




Mano XXL Snabbguide funktioner och knappar

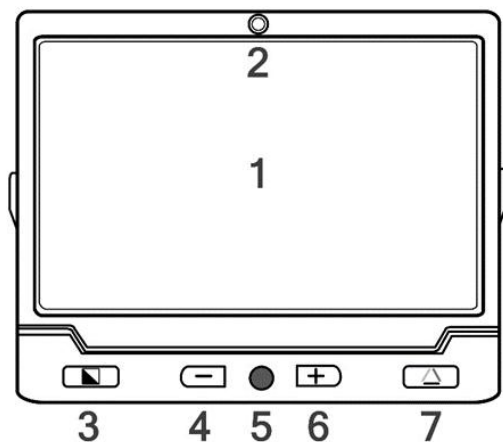

- 1. LCD skärm
- 2. Frontkamera
- 3. Förbättrad färg
- 4. Zooma ut
- 5. Joystick
- 6. Zooma in
- 7. Färgläge

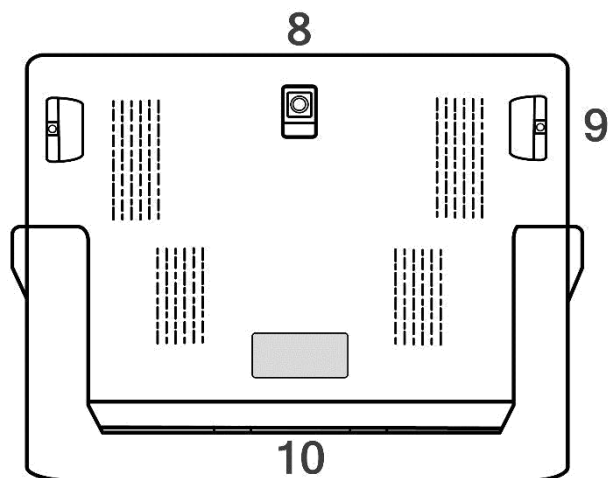

- 8. Bakre kamera
- 9. LED-lampor
- 10. Läs- / skrivstativ

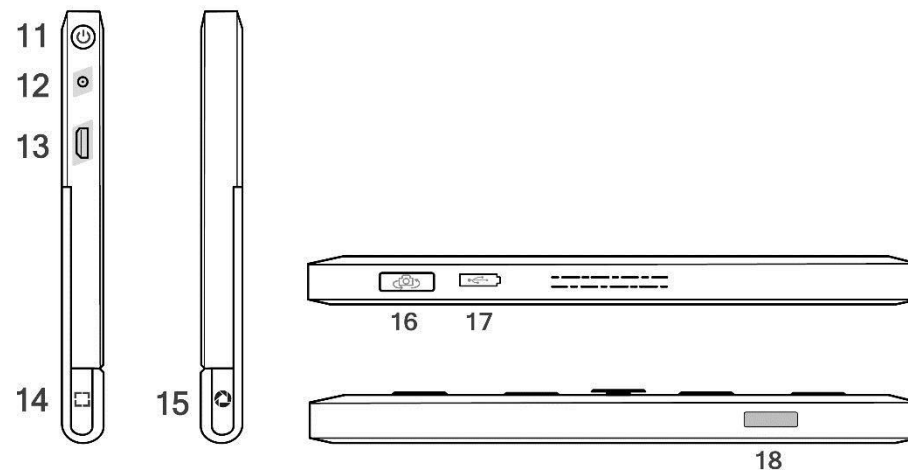


- 11. Strömknappen
- 12. Strömport
- 13. HDMI-port
- 14. Linjemarkör och skuggning + sökfunktion
- 15. Frysknapp
- 16. Kamerabrytare
- 17. Strömport
- 18. Fokuskontroll

Mano XXL Snabbguide funktioner och knappar



Strömknappen

- Håll ned strömbrytaren (I) i 5 sekunder för att slå på / stänga av.


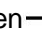
Signalkontroll

- Håll ned strömbrytaren (I) och tryck på Färg-knappen  för att slå på / av pipet.



Kamerabyte

- Vrid kameraknappen  vänster för att öppna den bakre kameran
- Vrid kameraknappen  höger för att öppna den främre kameran




Förstoring

- Tryck på Zooma in-knappen  för att öka förstoringen
- Tryck på zoom ut-knappen  för att minska


Färgläge

- Tryck på knappen Förbättrad färg  för att gå igenom listan över förbättrade färger.
- Tryck på knappen Färg  för att återgå till fullfärgsläget.



Ljusstyrka

- Håll ned strömbrytaren  och tryck på Zooma in-knappen  för att öka ljusstyrkan.
- Håll ned strömbrytaren (I) och tryck på zoom ut-knappen  för att minska ljusstyrkan.




Belysning

- Håll ned strömbrytaren (I) och tryck på Frysknappen  för att slå på / av


Fokuskontroll


- Klicka på fokuskontrollknappen  För att låsa fokus visas en röd ram runt skärmen, vilket är särskilt användbart vid handskrivning.
- Klicka på fokuskontrollknappen  igen för att låsa upp fokus försvinner den röda ramen.

Frysläge

- Tryck på Frysknappen  för att låsa den aktiva bilden.
- Tryck på Frysknappen  igen för att låsa upp.
- För den låsta bilden med ökad förstoring kan du använda Joystick  för att navigera fritt.

Stödlinje & Maskering

Tryck på lokaliseringsknappen  för att växla mellan olika läsninglinje- och masklägen.

Skjut joystick  för att ändra position och bredd.

Tryck på strömbrytaren  stänger snabbt linje- och masklägena.

Hitta

- Tryck länge på knappen Sök  i 1 sekund och håll kvar för att inte släppa den, en platsruta visas.