

Handledning

Stativ för MANO XXL



Innehåll

Innehåll	3
Funktion	4
Hantering	4
Packa upp	4
Användarsituationer	6
Exempel 1: Läsläge	6
Exempel 2: Skrivläge	8
Exempel 3: Avståndsläsning	10
Exempel 4: Spegelläge	11
Fäll ihop stativet	12
Specifikationer	14
Information om Garanti	15

Översikt

MANO XXL stativ är utformat för MANO XXL för att underlätta läsning / handskrift för synskadade.

Stativet är extremt kompakt och lätt, och manövreringen är också mycket enkel och intuitiv. Njut av läsning och handskrift med tillräckligt med utrymme.

Funktion




Fack för MANO XXL

Hantering

Packa upp

Steg 1: Dela på benen.

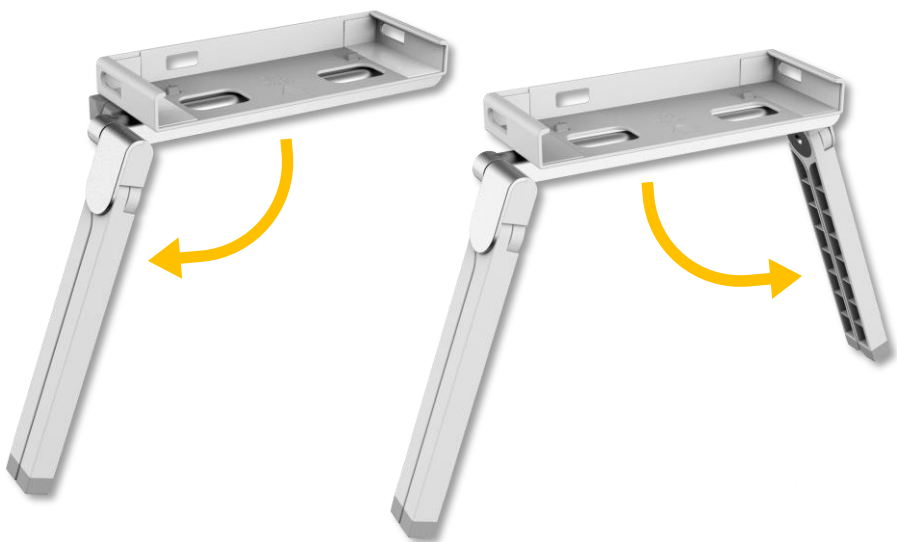

Steg 2: Dela upp benen för att bilda V-formen.



Steg 3: Skjut in MANO XXL i facketets spår tills den låses på plats.



Användarsituationer

Stativet är multifunktionellt för att hjälpa till vid:

- Läsning
- Skrivläge
- Avståndsläsning
- Spegelläge

Användningen kan varieras baserat på olika situationer. Här följer vår rekommenderade hantering.

Exempel 1: Läsläge

Justera så att din läsvinkel blir bekväm.



Med enhetens inbyggda stativ stängt är enheten faktiskt i fjärrläge, LED-lamporna är som standard släckta. För läsläge rekommenderar vi dock att du går in i läs- / handstillsläget med båda lamporna tända för en bättre upplevelse.

Gå in i läs- / skrivläget genom att använda någon av följande knapptryckningar:

- Tryck och håll ner Fokus kontroll-knappen **AF•L** i 3 sekunder

I det här läget tänds LED-lamporna och lamporna lyser mest.

Varning:

Titta aldrig direkt in i ljuskällan. Detta kan skada dina ögon.



Exempel 2: Skrivläge

Följande operationer är desamma som läsläget som beskrivs ovan:

- Justera så att din läsvinkel blir bekväm.
- Gå in i läs- / skrivläget

Det finns fyra ljuslägen som kan användas för att hjälpa till med handskrivningen.



Alla lampor av







Alla lampor på



Vänster lampa på, Höger av




Vänster lampa av, Höger på

- Håll ned strömbrytaren  och klicka på Frysknappen  för att slå på / av de två LED-lamporna samtidigt (hanteringen gäller för alla versioner).
- Håll strömbrytaren  intryckt och tryck på Focus kontrolknappen  för att växla mellan tre ljuslägen: Vänster lampa tänd, Höger ljus på och Alla lampor på / av (baserat på den senaste inställningen).



- **Skuggreducering vid handskrift**

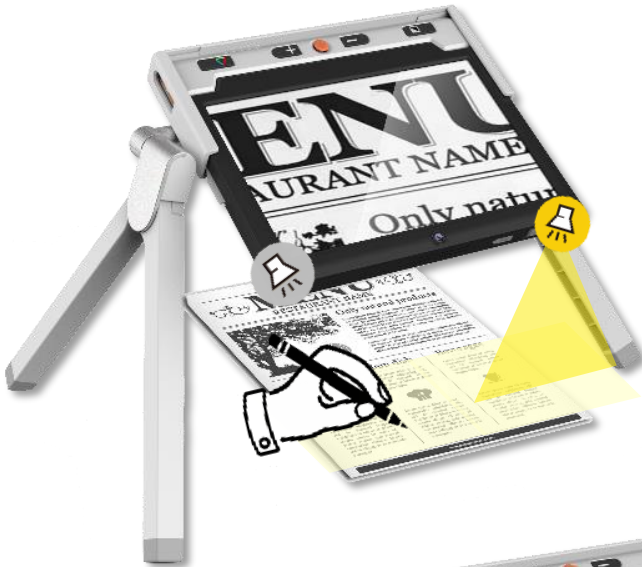
Om du till exempel är vänsterhänt stänger du av den vänstra LED-lampan. Om du är högerhänt kan du stänga av höger LED-lampa för att minska skuggan.



Exempel 3: Avståndsläsning


Om enheten är i läs- / skrivläge, rekommenderas att du avslutar läget först.

- Håll ned Fokus kontroll-knappen **AF•L** i 3 sekunder.
- Tryck och håll ned färgvalsknappen  och Färg-knappen  samtidigt i 3 sekunder (för gammal enhet utan Fokus kontroll-knappen **AF•L**).
- Justera betraktningvinkeln som bilden visar.
- Rotera enheten runt och vänd baksidan mot det objekt som du vill se.

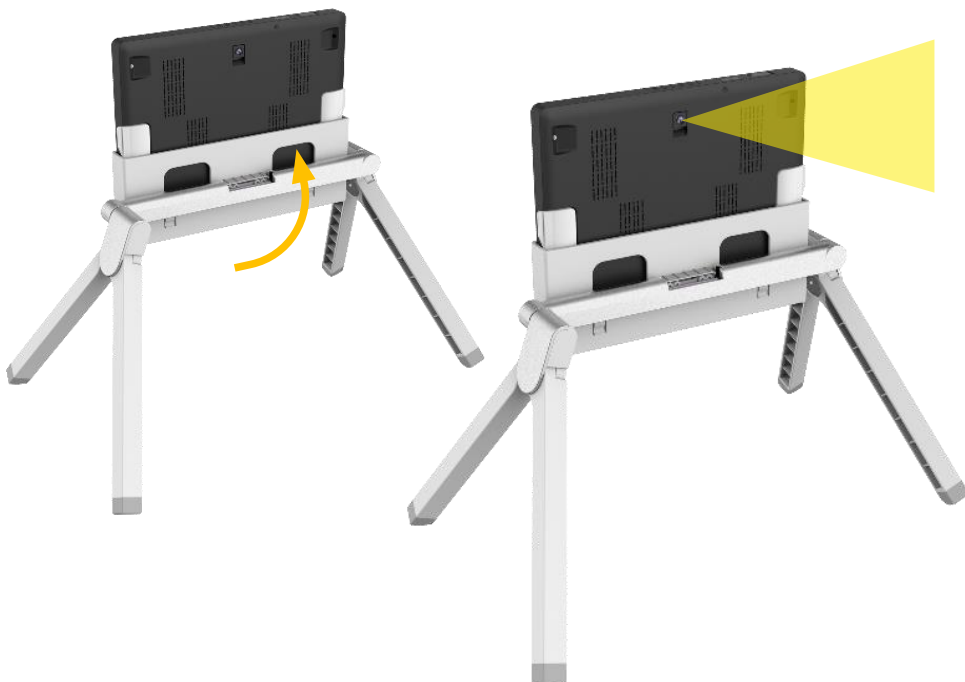

Exempel 4: Spegelläge

Följande operationer är desamma som fjärrvy-läget som beskrivs ovan.

- Om du befinner dig i läs- / skrivläge, avsluta först.
- Justera vinkeln.
- Vrid enheten runt och vänd den främre kameran mot det objekt som du vill se.
- Vrid kameraknapp  → för att öppna den främre kameran för Spegelläge.



Fäll ihop stativet

Fällningen är lika enkel som att vikas ut.

Steg 1:




Steg 2:




Varning:

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller benen på stativet.

Steg 3:

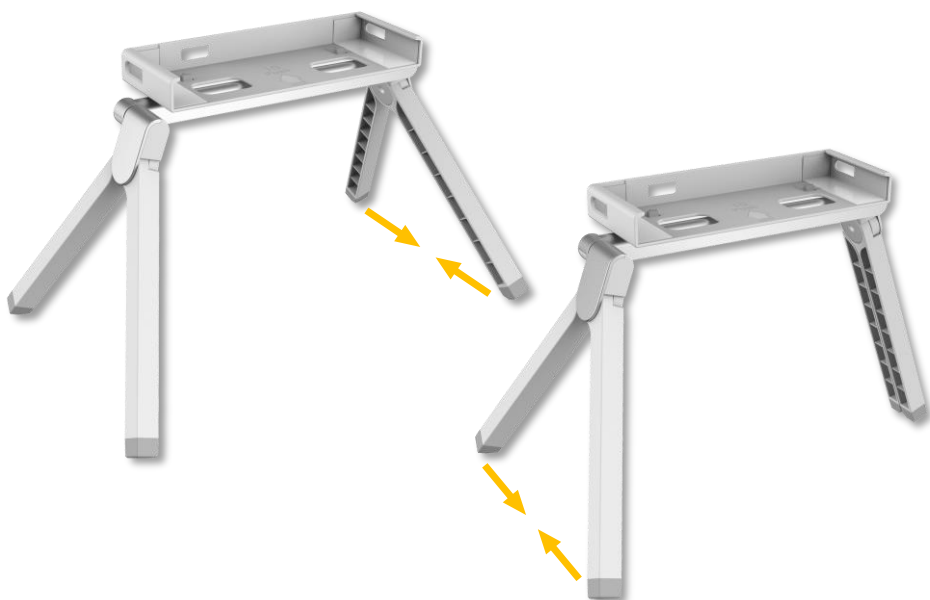

Steg 4:

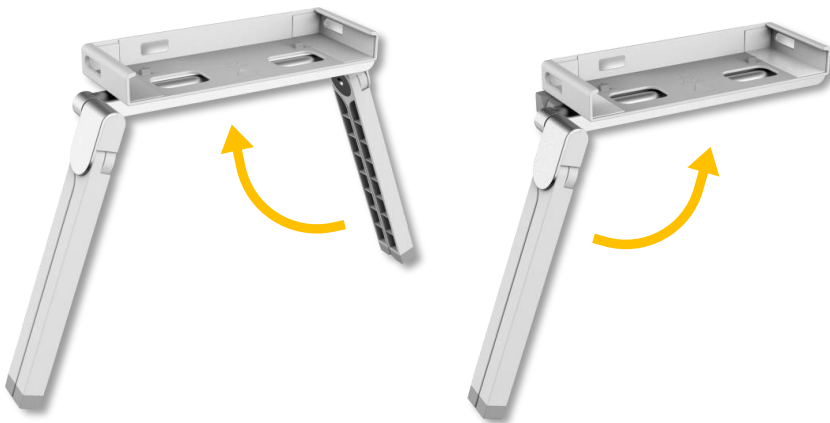

Specifikationer

- Mått ihopfälld (BxHxL): ungefär 305 x 52 x 100 mm
- Vikt: approx. 560 gram
- Justeringsvinkeln:
0-30° i läs- / skrivläget
0-90° i fjärr- / spegelläge.

Information om Garanti

1. Reinecker Vision GmbH ger en garanti på 24 månader (garanti-perioden gäller endast inom Europeiska unionen) mot defekter i tillverkningen räknat från fakturadatum från Reinecker Vision GmbH.
2. Alla delar som har bytts ut vid reparation av enheten kommer automatiskt att tillhöra Reinecker Vision GmbH.
3. Skador orsakade av felaktig användning eller av bristande efterlevnad av bruksanvisningen kommer att leda till att garantin upphävs.
4. Ingripanden från andra än Reinecker Vision GmbH auktoriserade specialister kan leda till ogiltighet på garantin.
5. Om ett garantianspråk är nödvändigt måste systemet returneras till tillverkaren i Alsbach-Hähnlein eller till din auktoriserade återförsäljare i originalförpackningen inklusive alla komponenter. Tillverkaren bär inte kostnaden för transport, förpackning och försäkring.

Telefonnummer: +49 6257 9311-0

Se våra allmänna villkor.

Din auktoriserade distributör:

ICAP AB

Karl Johansgatan 42

414 59 GÖTEBORG

Telefon: 031-704 3099

www.icap.nu



Reinecker Vision GmbH

Zentrale

Vertrieb, Kundenberatung:

Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Kundendienst:

Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 06257 9311-0

Fax: 06257 9311-8008

E-Mail: info@reineckervision.de

www.reineckervision.de

Reinecker Vision GmbH

International Contact

Försäljningsavdelning, kundrelationer:

Sandwiesenstraße 19
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

Kundservice:

Erlenweg 3
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: +49 6257 9311-0

Fax: +49 6257 9311-8230

E-Mail: international@reineckervision.de

www.reineckervision.com

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder einem Servicefall direkt an unser Hauptwerk in Alsbach-Hähnlein oder an eine unserer Niederlassungen.

Bei im Ausland erworbenen Produkten kontaktieren Sie im Servicefall bitte Ihren dort ansässigen Händler.

Om service är nödvändig, kontakta din auktoriserade distributör.