



A



A Håll bottenplattan med en hand och veckla ut stativet

B Vrid skärmen till en bekväm visning

C Veckla ut distanskameran och vrid den i önskad riktning

B



C



Drift i förstoringläge och menyer			
	kort tryckning: batteristatus	Långt tryck: slå PÅ/stäng AV/standby	
	kort tryckning: visa/dölj menyraden	lång tryckning: öppna meny	
	vridkontroll: ändra färgläge	Tryckstyrenhet: växla mellan verkliga färger och konstgjorda färger	
	horisontell och vertikal navigering i förstoringläge; navigering i bilden Galleri; justera storlek och placering av linjal och linjemaskering		
	vridreglage: zooma in/ut	Tryckstyrenhet: översiktsläge	
	zooma in/ut: använd nyp- och zoomgesten		
	tryck på den förstoraade bilden med fingrarna och flytta den		
	kort tryckning: växla kamerabild lång tryckning: till A4 läsläge		
	kort tryckning: växla mellan linjemarkör och mask		
	kort tryckning: frys bilden	långt tryck: spara bild	
	kort tryckning: Starta läsning (aktuell bildsektion) kort tryck i menyer och gallerier: bekräfta valet	långt tryck: börja läsa (A4-sida) långt tryck i gallerier: flerval	
	I menyer och gallerier: tryck med fingret på en ikon för att välja den		
Drift i Tal-läge			
	kort tryckning: visa/dölj menyraden långt tryck: avsluta Tal-läge		vridkontroll: zooma in/ut Tryckkontroller: original-zoom
	växla mellan bild- och textläge		textsegmentering PÅ/AV
	börja/sluta läsa		Tillbaka/framåt i avsnitt/mening
	Justera läshastighet		i bildläge: spara bild i textläge: spara text