


Snabbguide MANO 5

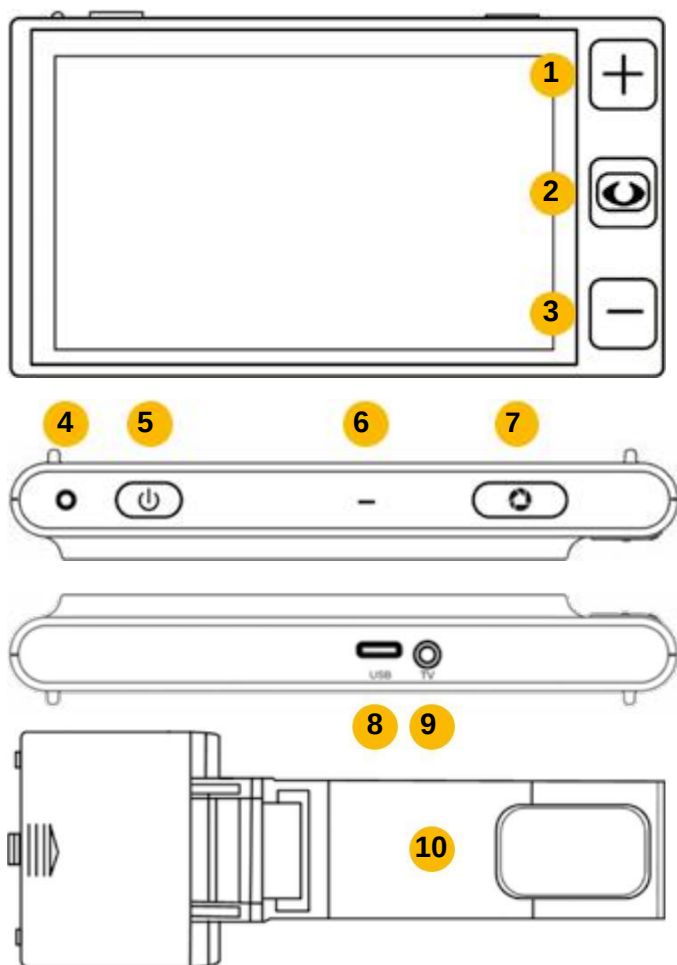

- 1) zooma in
- 2) Färgläge
- 3) zooma ut
- 4) status LED
- 5) På/Av knapp

- 6) högtalare
- 7) frys bild
- 8) USB-C port
- 9) TV port
- 10) Vändbart handtag

Snabbguide MANO 5

	Kort tryck	Långt tryck
	status	Sätt På/stäng av
	ändra färgläge	tillbaka till fullfärger/ ändra färglistan
	frysa bilden	akustiska signaler PÅ/AV
	zooma in (stegvis)	zooma in (kontinuerligt)
	zooma ut (stegvis)	zooma ut (kontinuerligt)
 + 	LED ljus PÅ/AV	
 + 	öka ljusstyrkan/ flytta frys bild	
 + 	minska ljusstyrkan/ flytta frys bild	
 + 	frys bild: ändra riktning konstgjorda färger: ändra kontrast	
 + 	Långt tryck: energisparläge PÅ/AV	
 + 	Långt tryck: återställ till fabriksinställningarna	